



Dr. Schumacher

INSTRUKCIJA: manuālai dozatoru apstrādei

Saskaņā ar Roberta Koha Institūta vadlīnijām, neatbilstoša dozatora higiēna, īpaši pie mazgāšanas losjonu izmantošanas, var izraisīt dozatora sistēmas un produkta baktēriju piesārņojumu. Dozēšanas ierīces korpusa un dozēšanas pumpīša tīrīšanas un dezinfekcijas biežums jādefinē slimnīcas iekšējās higiēnas plānos. Mēs rekomendējam sekojošus apstrādes intervālus.

Ja tiek lietots roku dezinfekcijas līdzeklis:

- Pilnīga dozatora korpusa un pumpīša apstrāde 2x gadā

Ja tiek lietots roku mazgāšanas losjons:

- Pilnīga dozatora korpusa un pumpīša apstrāde pie katras jaunas tvertnes nomaiņas.

UZMANĪBU:



Dozatora sagatavošanas laikā: "personāla aizsardzība ar potenciāli piesārņotu materiālu"

PIEZĪME:



Manuālā dozatora apstrāde attiecināma tikai uz tiem dozatoriem, kam tiek izmantoti rūpnīcas iestatījumi.

Sagatavošana:

Sagādāt sekojošos materiālus:

- Neplūksnājošas salvetes
- Tvertni ar aukstu ūdeni
- Tvertni ar karstu ūdeni (apm. 250 ml)
- Ātrās dezinfekcijas salvetes
- Dezinfekcijas šķīdumu
- Tīrīšanas birsti, kā prasīts

PROCEDŪRA

1

Izņemt tvertni ar produktu no dozatora. Turēt zem pumpīša salveti, lai novērstu jebkādu produkta pilēšanu, noņemot pumpīti. Novietot pumpīti uz salvetes vai ielikt izlietnē.

2

Noīrīt dozatora korpusu gan iekšējās, gan ārējās virsmas ar samitrinātu (neplūksnājošu) vienreizlietojamo salveti. Dezinficēt virsmas ar ātrās dezinfekcijas līdzekli, ievērojot norādīto iedarbības laiku.

3

Rūpīgi ar birstītes palīdzību iztīrīt pumpīti zem tekoša silta ūdens. Pie lielas netīrības pakāpes izmantot mazgāšanas birsti. Tīrot pievērst uzmanību pumpītim pie padeves. Noņemt zaļo gumiju no pumpīša un noīrīt to atsevišķi. Pēc tam izskalot pumpīti ar siltu ūdeni kā norādīts tālāk.

TĪRĪŠANA

4

Solis 1: Ieliet karstu ūdeni traukā un ielikt tajā pumpīti, 10x to piespiest.

Solis 2: Izņemt pumpīti ārā no ūdens trauka un piespiest tik ilgi, kamēr pašā pumpīti vairs nav ūdens.

Atkārtot soli 1 un soli 2.

PUMPĪŠA DEZINFEKCIJA

5

Solis 1: Ievietot pumpīti atpakaļ dozatora korpusā un pievienot tvertni ar dezinfekcijas šķīdumu uz spirta bāzes.

6

Tad izmantot dozatoru 15 – 20 reizes un savākt dozēto daudzumu atsevišķā traukā, kurā ir ieliets auksts ūdens. Ļaut dezinfekcijas šķīdumam iedarboties noteikto iedarbības laiku.

7

Solis 2: Pēc iedarbības laika beigām, izņemt no dozatora korpusa tvertni ar dezinfekcijas šķīdumu un iztukšot pumpīti pilnībā, turot zem pumpīša salveti vai trauku. Noslaucīt pumpīti ar tīru neplūksnājošu salveti.

8

Ievietot dozatora korpusā jauno tvertni ar jauno produktu. Izmantot dozatoru 15 – 20 reizes un savākt dozēto daudzumu atsevišķā traukā vai uz salvetes, savāktos daudzumu izmet kanalizācijas sistēmā.