

INSTRUKCIJA

ECO WIPES neplūksnājošo salvešu dispenseru uzpilde

Ja virsmu dezinfekcijai tiek lietota ECO WIPES neplūksnājošo salvešu uzpildes sistēma, jāievēro higiēnas pamatnormas. Lai uzpildītu salvešu dozatoru un rīkotos ar dezinfekcijas līdzekļiem, ievērojiet piemērojamus personāla aizsardzības noteikumus un valkājiet piemērotu aizsardzības aprīkojumu

Lietošanai gatavu dezinfekcijas līdzekļu uzpildei vai saskaņā ar ražotāja rekomendācijai sagatavotu dezinfekcijas darba šķīdumu uzpildei.

Uzpildītu dispenseru izmantošanas laiks 28 dienas ir pārbaudīts un testēts uz sekojošiem līdzekļiem: OPTISAL® PLUS, OPTISAL® N, DESCOSEPT AF, DESCOSEPT forte, DESCOSEPT pur, CLEANISEPT®

1



Noņemt dispenseram vāku un novietot to ar virsupsi uz leju uz tīras virsmas.

2



Paņemt sausās uzpildes salvetes un ievietot tās tvertnē/ dispenserā. Alternatīva: paņemt jau piesūcinātās, lietošanai gatavas salvetes un skatīt tālāk soli nr.4

3




Lēnām, ar spirālveida kustībām, ieliet dezinfekcijas šķīdumu dispenserā, kurā ir ielikts jauns sauso salvešu rullis.

Dozēšanas instrukcija:

Salvetis rullī	50	70	100	120
Darba šķīdums	1,5L	1,5L	3,0L	2,5L

4

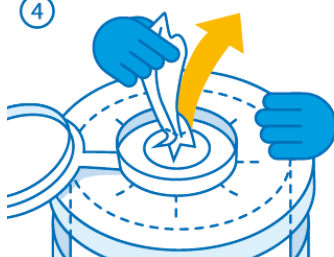

Izvilkt uz āru caur zvaigžņveida atveri visdziļāk esošo salveti.

5



Aizvērt dispenseru/ tvertni.

6



Nodrošināties, ka uz āru izvilktā salvete ir pilnībā atrodas zem vāciņa to aizverot.

7



Aizpildīt atbilstošos informatīvos laukus uz dispensera/ tvertnes.

8



Sistēma ir lietošanai gatava pēc 30 minūtēm. Uzmanību: pie lietošanas pirmā salvete ir jāizmet laukā. Aizvērt vāku pēc katras lietošanas reizes.